

NÁVOD NA POUŽITIE

Aerosólový vyvíjač FURETTO ORIGINAL



Aerosolový vyvíjač FURETTO je zadymovací aplikátor liečiva a používa sa na preliečenie včelstiev proti klieštikovi *Varroa Destructor*. Ako nosná látka sa používa medicínny biely olej. Pomocou zariadenia Furetto je možné veľmi rýchlo a jednoducho účinne fumigovať včelstvá pomocou vytvorenej hmly s liečivom. Splyňovanie nosného média s liečivom zabezpečuje špeciálny horák na Propán-Bután, ktorý vháňa vytvorený aerosól priamo do úľového letáča. Ošetrovanie jedného včelstva trvá cca 2 sekundy a prevádza sa do teploty okolia +8°C bežnými liečivami schválenými pre použitie.



POZOR ! NEPOUŽÍVAŤ S KYSELINOU ŠŤAVELOVOU !

UPOZORNENIE !


Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo neprimeraným zaobchádzaním so zariadením.

Bezpečnostné pokyny pre použitie zariadenia

1. Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti nehrali so zariadením.
2. V prípade poškodenia zariadenia by mala opravu vykonať len kvalifikovaná osoba.
3. Zariadenie je navrhnuté pre používanie jednou osobou.
4. Počas prevádzky musia byť všetky časti zapojené do zariadenia.
5. Pre správnu obsluhu a údržbu zariadenia sú nevyhnutné aspoň základné technické zručnosti obsluhujúcej osoby.
6. Pri manipulácii s plynovými náplňami je nutné sa zdržiavať mimo dosahu ohňa alebo iných zdrojov tepla.
7. Vymieňať sa môžu v zariadení len prázdne plynové kartuše.
8. Počas aplikácie je potrebné používať ochranné pracovné prostriedky – rukavice a dýchaciu masku.
9. Zariadenie sa smie používať len v exteriéri (vo vonkajšom dobre vetranom prostredí).
10. Zariadenie udržiajte pri teplote nad 0°C.

Použitie zariadenia

Zloženie a popis častí zariadenia

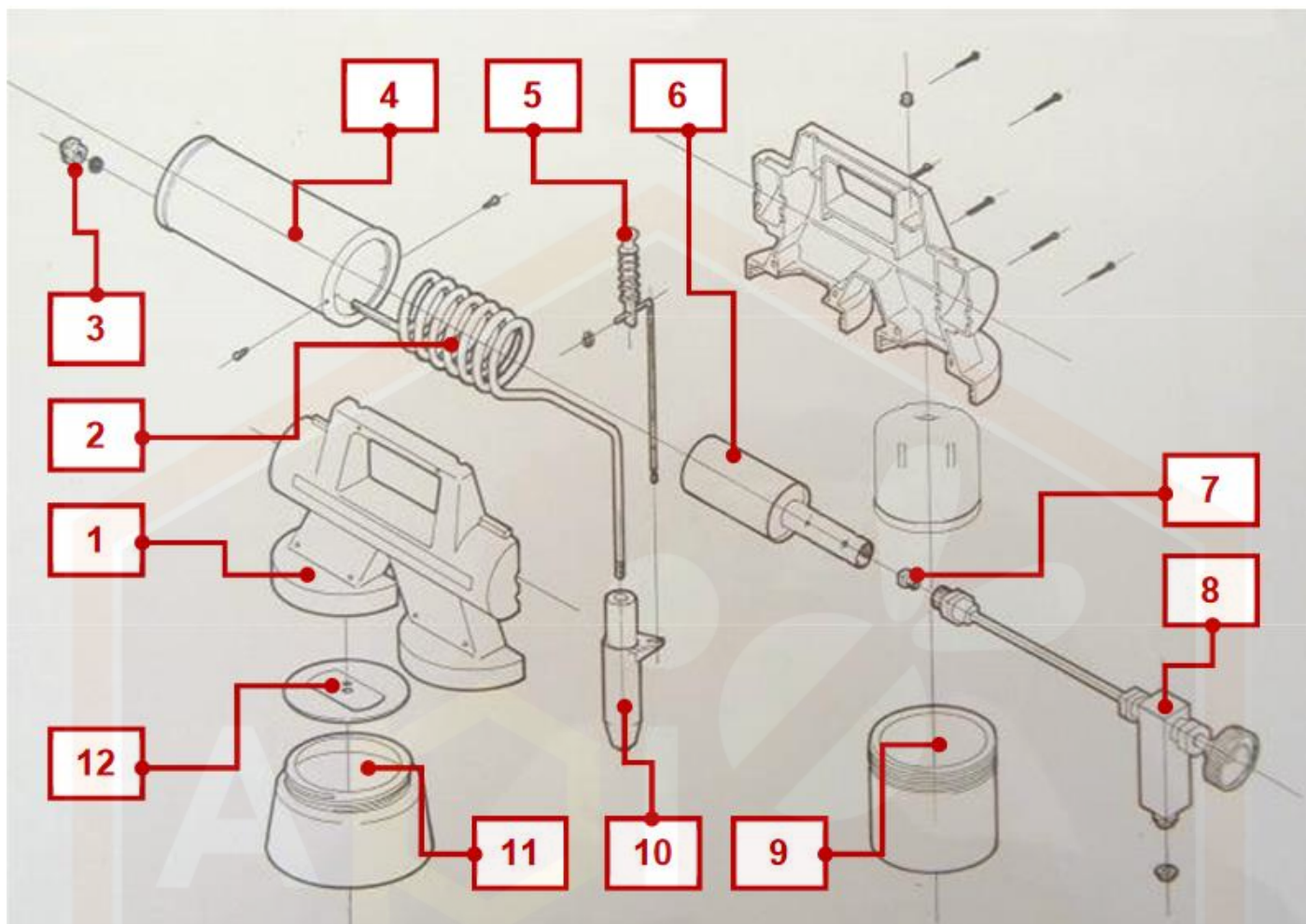

Obr.1. Jednotlivé súčasti zariadenia

- | | |
|--|---|
| 1 – Držadlo so skrutkami | 7 – Tryska plynového ventila |
| 2 – Špirálový vývod | 8 – Plynový ventil, komplet |
| 3 – Rozprašovacia tryska | 9 – Zásobník plynovej kartuše (červený) |
| 4 – Ochranná mriežka, komplet so skrutkami | 10 – Čerpadlo, komplet |
| 5 – Tlačidlo s tyčkou a pružinou | 11 – Nádrž na tekutinu – liečivo (žltá) |
| 6 – Horák | 12 – Tesnenie nádrže |

Postup použitia

Stlačením a následným uvoľnením tlačidla (5) sa nasaje pomocou čerpadla (10) liečivo z nádržky na tekutinu (11). Liečivo sa nasaje do špirálového vývodu (2), kde sa po zahriatí okamžite premení na aerosól (paru, hmlu) a vychádza z rozprašovacej trysky (3) priamo cez letáč do úľa. Každé streknutie trvá max. 2 sekundy. Vlhkosť aerosólu závisí od frekvencie čerpania (pumpovania tlačidlom). Odporúča sa opakovať stláčanie tlačidla v intervaloch 5 sekúnd.

Založenie plynovej kartuše:

Počas vkladania plynovej kartuše sa zdržujte mimo dosah otvoreného plameňa alebo iných zdrojov tepla. Plynovú kartušu vymieňajte len po jej úplnom vyprázdnení. Používajte certifikované kompatibilné plynové kartuše 190g (rozmer 90 x 90 x 90 mm).

Pred vložením plynovej kartuše do červeného zásobníka sa ubezpečte, že je plynový ventil (8) dôkladne uzatvorený. Odskrutkujte a vyberte červený zásobník na plynovú kartušu (9). Vložte kartušu do vnútra červeného zásobníka. Opatrne naskrutkujte červený zásobník s kartušou naspäť k zariadeniu.

Naplňte žltú nádrž na tekutinu (11) príslušným liečivom, ktoré sa má použiť na ošetrovanie. Dbajte na to, aby sa v tekutine (liečive) nenachádzali žiadne nečistoty (pevné časti), ktoré by mohli upchať trysku. V prípade, že sa v tekutine nachádzajú nejaké pevné časti, prefiltrujte ju pred použitím v zariadení. Potom dotiahnite nádobu na rukoväť zariadenia. Umiestnite zariadenie Furetto na rovný povrch, zapáľte oheň pomocou zapaľovača (zápaliek) a držte ho v blízkosti kovovej mriežky (4). Otvorte plynový ventil (8) pomocou regulačného ventilu (otočením v smere označenia „+“). Plameň by sa mal ihneď spustiť. Nechajte výparník predhriať približne 2 minúty. Následne môžete začať s aplikáciou liečiva.

UPOZORNENIE

Počas používania zariadenia je kovová ochranná mriežka veľmi horúca. So zariadením manipulujte opatrne, nedotýkajte sa kovovej mriežky. Nedovoľte, aby plameň presiahol kryt horáka. Špirála sa nemôže rozžeraviť do červena (musí zostať čiernej až sýto bordovej farby). Pri správnom používaní je životnosť špirály 10-12 rokov.

V prípade že je vychádzajúca para príliš mokrú, zastavte čerpanie (pumpovanie tlačidlom) a nechajte paru voľne vyjsť. Potom stláčajte a uvoľňujte tlačidlo v dlhších intervaloch (podľa potreby). Po dokončení ošetrovania demontujte žltý zásobník na liečivo. Potom stlačte tlačidlo až kým sa čerpadlo úplne nevyprázdni. Po vyprázdnení systému od liečiva uzatvorte plynový trysku pomocou kruhového regulačného ventilu (otočením v smere označenia „-“).

UPOZORNENIE

Na konci každého ošetrovania dôkladne vyčistite špirálový vývod, aby nedošlo k jeho zaneseniu zvyškami použitého liečiva. Žltú nádrž na tekutinu zložte ešte počas toho, kedy je Furetto stále zapnuté. Potom pokračujte v čerpaní (pumpovaní tlačidlom) ako pri bežnom používaní. Pokračujte v čerpaní so zariadením nakloneným a otočeným hore dnom, až kým sa neobjaví žiadny biely dym. Po skončení práce nechajte zariadenie vychladnúť na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a zvierat. Miesto musí byť zabezpečené proti prípadnému vzniku požiaru.

Látky, ktoré môžu byť aplikované pomocou zariadenia Furetto sú rovnaké, ako sa všeobecne používajú na liečbu akaricídov a baktericídov v súlade s platnými pravidlami krajiny, v ktorej sa používajú. Výrobca a predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za používanie látok, ktoré nie sú povolené zákonom.

Odporúča sa len jedna aplikácia liečiva. Zmes s liečivom je vhodné pripraviť tesne pred použitím. V prípade malého zamorenia klieštikom stačí jedno streknutie. Odporúča sa vyhnúť sa liečbe počas rojenia a liečiť pri teplote vyššej ako 8 °C. Liečba sa má vykonať raz za rok, v októbri alebo novembri.

Údržba a skladovanie zariadenia

Nie je potrebná žiadna špeciálna údržba. Po použití a vychladnutí zariadenia je potrebné vyčistiť rozprašovací trysku (3) pomocou petroleja. Nádržku na liečivo vyčistite a utrite do sucha. Pri pravidelnom používaní prístroja sa odporúča vymeniť tesnenie každé dva roky. Zariadenie uskladnite po jeho vychladnutí. Skladujte vo vetranom priestore a mimo dosahu detí. Zariadenie skladujte pri teplote nad 0°C

Likvidácia

Nepotrebné alebo pokazené zariadenie je možné odovzdať v zberni triedeného odpadu. Spotrebiteľ má právo na vrátenie použitého zariadenia v tom prípade, ak novo zakúpené zariadenie je rovnakého typu a spĺňa rovnakú funkciu ako použité zariadenie.